

Kompresszoros inhalátor

PR-812



EC	REP
----	-----

Shanghai International
Holding Corp. GmbH Europe,
Eiffelstrasse 80, 20537
Hamburg, Germany



Kompresszoros inhalátor**PR-812****Nebulizator elements: (illustration)**

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 01. Ki/be kapcsoló | 05. Levegő kimenet | 09. Felnőtt maszk |
| 02. Fogantyú | 06. Levegő cső | 10. Gyermek maszk |
| 03. Szellőzőnyílás | 07. Porlasztó palack | 11. Tartalék légszűrők |
| 04. Szűrő | 08. Szájrész | |

FONTOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK

Megjegyzés: Használat előtt olvassa el figyelmesen a teljes használati utasítást. Az alábbi alapvető óvintézkedések szükségessége az elektromos termék használatakor: Vigyázat! Az összes óvintézkedés elolvasásának és betartásának elmulasztása személyi sérüléshez vagy a berendezés károsodásához vezethet.

TERMÉKI FIGYELMEZTETÉSEK:


1. Az áramütés elkerülése érdekében: Tartsa a készüléket távol víztől - Ne merítse a tápkábelt vagy a készüléket folyadékba - Ne használja fürdés közben - Ne nyúljon a vízbe esett készülékért - azonnal húzza ki a készüléket a hálózathoz.
2. Soha ne működtesse a készüléket, ha sérült alkatrészei vannak (beleértve a tápkábelt is), ha leejtették vagy vízbe merítették. Azonnal küldje el egy szervizközpontba vizsgálatra és javításra.
3. A készüléket nem szabad olyan helyen használni, ahol gyúlékony gáz, oxigén vagy aeroszolos permetszereket használnak.
4. Tisztítás, feltöltés előtt és minden használat után húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.
5. Ne használjon más tartozékokat, hacsak a gyártó nem ajánlja.

Üzemeltetési óvintézkedések:

1. Csatlakoztassa ezt a terméket a modellnek megfelelő feszültségű konnektorhoz.
2. Ne működtesse ezt a terméket felügyelet nélkül.
3. Soha ne működtesse, ha a készüléknek sérült a vezetéke vagy a dugója, ha leejtették, vagy bármilyen módon vízbe került, ha nem működik megfelelően. Juttassa vissza a szervizközpontba javítás céljából.
4. Bármilyen rendellenesség esetén azonnal hagyja abba a készülék használatát, amíg a készüléket meg nem vizsgálják és meg nem javítják.
5. Használat után mindig azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból.
6. Soha ne zárja el a főegység szellőzőnyílásait, és ne helyezze azt olyan helyre, ahol a szellőzőnyílások elzáródhatnak.

TÁROLÁSI FIGYELMEZTETÉSEK:

1. Ne tárolja a készüléket közvetlen napfény, magas hőmérséklet vagy páratartalom alatt.
 2. Tartsa a készüléket kisgyermekek elől elzárva. Használaton kívül mindig tartsa a készüléket kihűzva.
- Tisztítási óvintézkedések:**
1. Ne merítse a készüléket vízbe. Ez károsíthatja a készüléket.
 2. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.
 3. Minden használat után tisztítson meg minden szükséges alkatrészt a jelen útmutatóban leírtak szerint.

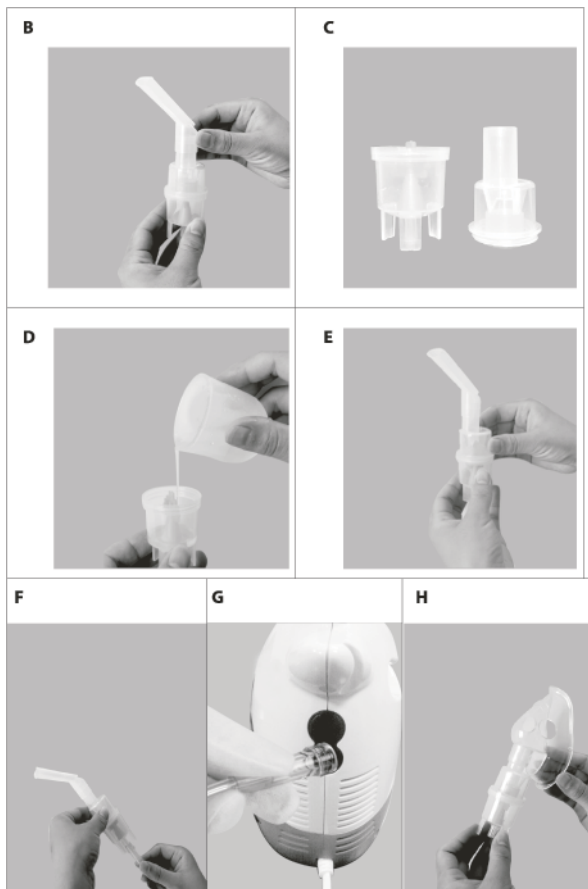

A KOMPRESSZOROS PORLASZTÓ MŰKÖDTETÉSE

- Megjegyzés: Az első üzembe helyezés előtt a porlasztót alaposan meg kell tisztítani.
1. Helyezze a kompresszoros porlasztót egy sima és stabil felületre. Ūlve győződjön meg róla, hogy a kezelő részt könnyen elérheti.
 2. Nyissa ki az átlátszó fedelet, és vegye ki a belső tartozékokat. Fontos: Az első használatba vétel előtt a porlasztót alaposan meg kell tisztítani a kézikönyvben található "Tisztítási eljárások" című fejezetre hivatkozva.
 3. Óvatosan csavarja el a porlasztó felső részét az óramutató járásával ellentétes irányba a porlasztó szétszereléséhez.
 4. Töltsé meg a porlasztó alsó részét az orvos által előírt gyógyszerrel. Ūgyeljen arra, hogy a kúp az alsó részbe kerüljön.
 5. Óvatosan csavarja el a felső részt az óramutató járásával megegyező irányba, hogy újra összeszerelje a porlasztót. Győződjön meg róla, hogy a két rész jól illeszkedik egymáshoz.
 6. Csatlakoztassa a levegőcső egyik végét a porlasztó aljához.
 7. Csatlakoztassa a légső másik végét a kompresszor elején található légsőcsatlakozóhoz.
 8. Csatlakoztassa a szájrészt vagy maszkot az Ön választása szerint a porlasztó felső részéhez.
 9. Csatlakoztassa a tápkábel egy megfelelő elektromos konnectorba. Győződjön meg arról, hogy ebben a szakaszban a hálózati kapcsoló "OFF" állapotban van.
 10. Nyomja meg a hálózati kapcsolót az előírt kezelés megkezdéséhez.

Fontos: A kompresszor motorja hővédővel rendelkezik, amely kikapcsolja a készüléket, mielőtt az túlmelegedne. Amikor a hővédő lekapcsolja a készüléket, kérjük: a. Kapcsolja ki a készüléket. b. Húzza ki a készüléket a konnectorból. c. Újabb kezelés előtt várjon 30 percet, amíg a motor lehűl. Győződjön meg róla, hogy a levegőnyílások nem akadályozzák. Ha a kezelés befejeződött, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnectorból.

5. TISZTÍTÁS: Javasoljuk, hogy a porlasztót, a szórófejet és a maszkot minden használat után alaposan tisztítsa meg forró vízzel, a nap utolsó kezelése után pedig enyhe tisztítószerral tisztítsa meg. Ha orvosa vagy légzésterapeutája más tisztítási eljárást ír elő, kövesse utasításait.

Öblítés (minden kezelés után):

1. Csatlakoztassa le a levegő csövet, a porlasztót, a szórófejet és a maszkot.
2. Óvatosan csavarja el a porlasztót, hogy kinyissa.
3. Öblítse ki a porlasztót, a szájrészt és a maszkot vízzel.
4. Szárítsa meg őket tiszta, puha törülközővel, vagy hagyja megszáradni a levegőn.
5. Szerelje össze újra a porlasztót, ha teljesen megszáradt, és tegye ezeket az alkatrészeket egy száraz, lezárt tárolóedénybe.

Fertőtlenítés: Kérjük, kövesse a következő lépéseket a porlasztó fertőtlenítéséhez, hacsak orvosa másként nem rendelkezik. Javasoljuk, hogy a készüléket a napi utolsó kezelés után fertőtlenítsé.

1. Használjon egy rész fehér ecetet három rész desztillált vízzel. Győződjön meg róla, hogy a kevert oldat elegendő ahhoz, hogy elmerítse a porlasztó, a szájrész és a maszk.

2. Végezzé el az 1-3. öblítési lépést.
3. Mossa ki a porlasztót, a szájrészt és a maszkot meleg vízben és enyhe tisztítószerral. Ezután mossa ki őket forró csapvízben.
4. Merítse ezeket a részeket harminc percre az ecetes-vizes oldatba.
5. Végezzé el az öblítés 3-5. lépését.

A kompresszor tisztítása: Szűrőcsere

1. Naponta törölje át nedves ruhával.
2. Ne használjon por állagú tisztítószeréket vagy szappanos párnákat, mivel azok károsíthatják a felületet.
1. Ne használjon pamutot vagy más anyagokat. Ne mossa vagy tisztítsa a szűrőt. Kizárólag szűrővel használja. És ne működjön szűrő nélkül.
2. Cserélje ki a szűrőt 30 naponta, vagy amikor a szűrő elszűrűl.
3. A cserére vonatkozó eljárás: A. Távolítsa el a szűrőfedelet B. Cserélje ki az elhasznált szűrőt egy új szűrőre. C. Helyezze vissza a szűrőfedelet.

SPECIFICATIONS

AC tápellátás:	110V/120V/220V/230V 50/60HZ
Fogyasztás:	180 VA Max
Gyógyszerkapacitás:	10 ml
Részecskeméret:	0.5 től 10 um-ig
MMAD:	3 um
Zajszint:	<55dB
Átlagos porlasztási sebesség:	>0.3l/min(2% saline solution)
Kompresszornyomás-tartomány:	29 to 52 Psi / 200 to 360 Kpa / 2 to 3.6 bar
Ūzemi nyomástartomány:	11.6 to 19 Psi / 80 to 130 Kpa / 0.8 to 1.3 bar
Liter áramlási tartomány:	5.0-8.0 lpm
Működési hőmérséklet-tartomány:	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Működési páratartalom-tartomány:	10 to 90% RH
Tárolási hőmérséklet-tartomány:	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Tárolási páratartalom tartomány:	10 to 95 % RH
Méret:	185mm × 110mm × 180 mm
Nettó súly/tényleges súly	1.5kg / 1.8kg